


Användarmanual

Careportal

Endast för vårdpersonal

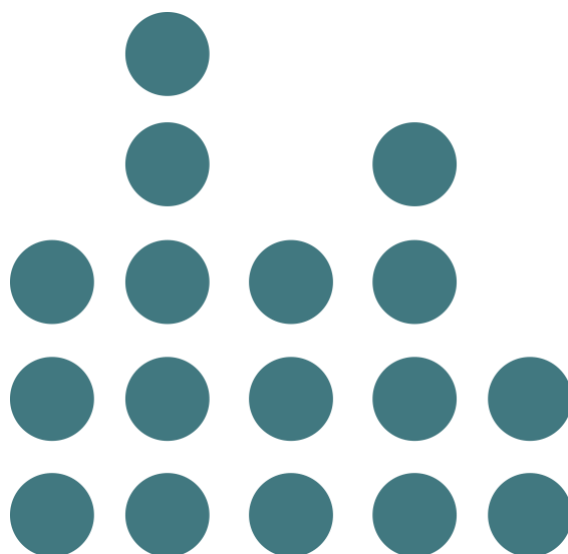

AsthmaTuner

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 ALLMÄNT	3
1.1 INLEDNING.....	3
1.2 AVSEDD ANVÄNDNING.....	3
1.3 AVSEDDA ANVÄNDARE.....	3
1.4 ASTHMATUNER INGÅENDE DELAR.....	3
1.5 VIKTIG INFORMATION FÖR VÅRDPERSONAL VID ANVÄNDNING AV ASTHMATUNER.....	4
1.6 KONTRAINDIKATIONER OCH KOMPLIKATIONER VID SPIROMETRIUNDERSÖKNING.....	4
2 INLEDNING TILL CAREPORTAL	4
2.1 INLOGGNING OCH UTLOGGNING.....	5
3 ÖVERSIKT AV CAREPORTAL	6
3.1 PATIENTLISTA.....	6
3.2 BEHANDLINGSMALLAR.....	8
3.3 LÄKEMEDELSSORTIMENT	9
3.4 VÅRDPERSONAL – ENDAST ADMIN.....	9
3.5 LOGG - ENDAST ADMIN.....	9

Allmänt

1.1 Inledning

Välkommen som användare av AsthmaTuner! Läs noga igenom denna användarmanual för att få viktig information och bästa möjliga upplevelse av AsthmaTuner.

1.2 Avsedd användning

AsthmaTuner är avsedd för egenvård och uppföljning av astma. AsthmaTuner möjliggör följsamhet till en individuell behandlingsplan som förskrivits av behandlande läkare. Vidare möjliggör AsthmaTuner uppföljning av ordinerad behandling, lungfunktion och upplevda symptom över tid, vilket kan ses som ett stöd för utbildning och egenvård, samt ett beslutstöd för diagnostik.

1.3 Avsedda användare

AsthmaTuner är avsedd att användas av personer som utreds eller behandlas för astma från 6 års ålder och uppåt. All användning för barn och tonåringar under 18 år ska ske under vårdnadshavares tillsyn. Det betyder att barn och ungdomar måste få stöd, råd och information från vårdnadshavare vid behov när de använder AsthmaTuner. Inmatning av behandlingsplan i AsthmaTuner ska göras av behörig sjukvårdspersonal. AsthmaTuner är för närvarande tillgänglig på svenska och engelska och ska användas av personer som behärskar dessa språk.

1.4 AsthmaTuner ingående delar

1. Trådlös lungfunktionsmätare
2. Smartphone app till iOS och Android
3. Webgränssnitt för vårdgivare

Bild 1



Bild 2

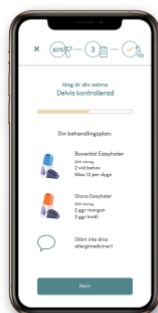


Bild 3



OBS! iOS och Android apparna är väldigt lika varandra men skiljer sig på några få punkter. Bilder i manualen illustrerar iOS-appen.

1.5 Systemkrav

För att kunna använda AsthmaTuner krävs en smartphone som stödjer:

- Bluetooth 4.0 eller över
- iOS 10 eller över
- Android 6 eller över.
- Du behöver även Mobilt BankID eller en anhörig med Mobilt BankID för att skapa konto.

AsthmaTuner Careportal nås genom en webbläsare på en dator. De godkända webbläsarna inkluderar:

- Safari
- Internet Explorer IE11+
- Edge
- Firefox
- Google Chrome

Rekommendationen är att alltid använda den senaste versionen av webbläsare. Om inget annat står angivet stöds de två senaste stora releaserna av ovan listade webbläsare.

1.6 Viktig information för vårdpersonal vid användning av AsthmaTuner

Se till att utbilda alla användare i hur man använder AsthmaTuner och kontrollera att patienten vet hur man mäter sin lungfunktion.

- **Varning!** Kontrollera att läkemedel som ingår i patientens behandlingsplan i AsthmaTuner överensstämmer med läkemedel som har förskrivits i journalsystemet som används på kliniken.
- **Varning!** Kontrollera att patienten inte använder läkemedel som inte bör användas med vissa astmaläkemedel, exempelvis betablockerare.

1.7 Kontraindikationer och komplikationer vid spirometriundersökning

Lungfunktionstest bör inte utföras vid, nyligen genomgången operation eller hjärtinfarkt samt aortaaneurysm. Bedömningen bör göras individuellt av ansvarig läkare [1]. I övrigt är komplikationer sällsynta vid spirometriundersökning. Mycket sällsynt är yrsel samt olika typer av bröstsmärtor. Vid besvärlig yrsel avbryts undersökningen och vila rekommenderas innan ny undersökning görs.

2 Inledning till Careportal

Syftet med Careportal är att kunna stötta utvärdera patienters astma och stötta dem i behandling och egenvård, både för fysiska och digitala vårdbesök.

För att komma igång så måste kliniken som du jobbar på vara ansluten till AsthmaTuner. Kontakta info@asthmatuner.com för att ansluta till AsthmaTuner. Kliniken utser lokala administratörer för AsthmaTuner. Dessa administratörer läggs upp som admin-användare av

bolaget MediTuner som tillhandahåller tjänsten, och kan sedan lägga upp vilka av klinikens vårdpersonal som kan logga in och använda systemet.

2.1 Inloggning och utloggning

För att logga in besöker du sidan careportal.asthmatuner.com. Du identifierar dig själv med antingen SITHS-kort eller Bank ID. Om du använder AsthmaTuner på flera kliniker väljer du vilken du önskar logga in på.

Utloggning görs genom att klicka på symbolen med en pil ut genom en dörr.

3 Översikt av Careportal

Vårdgivargränssnittets utseende och funktionalitet skiljer sig beroende på om vårdpersonalen är registrerade som "administratör" eller inte. I admin-personalens uppgift ingår att hantera åtkomst för de personer som har tillgång till gränssnittet för respektive klinik. Vårdgivargränssnittets menylista består fem flikar.

1. Patientlista
2. Behandlingsmallar
3. Läkemedelsortiment
4. Vårdpersonal (endast admin)
5. Logg (endast admin)

Önskar du ändra språk klickar du på jordglobssymbolen och befintligt språk högst upp till höger.

3.1 Patientlista

Efter inloggningen landar du direkt i "Patientlistan". Här får du snabbt en överblick över vilka patienter som är kopplade till din klinik och nyckelinformation om patienten

Lägg till patient

Klicka på "Lägg till patient", då öppnas en ruta där du fyller i patientens personnummer. Efter att du klickat lägg till skickas en förfrågan till patienten som de måste godkänna i AsthmaTuner appen – innan du kan se datan.

Ta bort patient

Om en patient inte längre ska använda AsthmaTuner kan du plocka bort patienten från kliniken. Markera då patienten genom checkbox-rutan och välj ta bort. Du kommer inte längre kunna se patientens information så viktigt att du journalför informationen innan.

Sortera, Sök och filtrera

Det finns möjlighet att sortera listan genom att klicka på de olika rubrikerna i tabellen.

Du kan söka upp en specifik patient genom att skriva in patientens namn eller personnummer i sökfältet och klicka sök.

Du kan även filtrera listan, då syns bara de patienter för det filtret du valt. Du kan filtrera efter en specifik vårdpersonal, om patienten har behandlingsplan eller ej.

Navigera in på en patient

För att få mer information om en patient kan klicka varsomhelst på raden i tabellen. För varje patient finns information indelad i fyra stycken underflikar; "Patientinformation", "Behandlingsplan", "Trendgraf" och "Diagnosgraf".

3.1.1 Patientinformation

"Patientinformation" innehåller kontaktuppgifter och specifik information om patienten. Till vänster i vyn kan en specifik vårdpersonal tilldelas patienten, för att t.ex. underlätta för uppföljning och sortering. Informationsfälten till höger fylls i av patienten själv i AsthmaTuner appen och kan inte ändras i Vårdgivargränssnittet.

3.1.2 Behandlingsplan

Här skapar du en behandlingsplan till patienten. Behandlingsplanen är färgkodad och indelad i tre steg, grön för kontrollerad astma, gul för delvis kontrollerad astma och röd för okontrollerad astma.

Skapa eller ändra en behandlingsplan

Klicka "Skapa behandlingsplan" För att skapa en ny, eller göra justeringar till en befintlig behandlingsplan klicka på "Ändra".

1. Välj läkemedel i drop-down menyn till vänster.
2. Välj därefter om det valda läkemedlet är för "Regelbundet" eller "Vid behov" intag
 - a. För regelbundet, ställ in dos morgon / middag / kväll
 - b. För vid behov, ställ in antal per gång och maxantal per dygn
3. Lägg till behandlingen till rätt behandlingssteg i behandlingsplanen genom att trycka på "+ knappen". Ett klick på grön knapp lägger till behandlingen till den gröna nivån, gul på delvis kontrollerad och röd på okontrollerad.
4. Gör om steg 1-3 till dess att behandlingsplanen är komplett, och klicka sedan spara Den nya behandlingsplanen ligger nu upplagd som aktuell behandlingsplan i vårdgivargränssnittet och i patientens AsthmaTuner app. Patienten kommer även att få ett meddelande i sin app att behandlingsplanen är uppdaterad.

Du kan skapa en hel behandlingsplan genom att använda en behandlingsmall. Du väljer då behandlingsplanen högst upp i vänstra hörnet. Hela behandlingsplanen populeras då.

Spara som favorit

Du kan spara en behandlingsplan som en "Favorit" genom att namnge den behandlingsplan du just gjort genom att skriva ett namn till behandlingsplanen i rutan längst ner och klicka "Lägg till" Den aktuella behandlingsplanen kommer att sparas som en av dina personliga favoriter. Den hamnar under fliken "Behandlingsmallar", läs mer där.

Övrigt

Under den aktuella behandlingsplanen finns en tabell med en patientspecifik logg som visar vilka vårdpersonal som tittat eller gjort förändringar på patientens behandlingsplan.

Varning! Säkerställ att du lagt upp rätt läkemedel och styrka genom att granska behandlingsplanen innan du lämnar fliken "Behandlingsplan".

Varning! Säkerställ att de ordinerade läkemedlen finns med i FASS och att dosen inte överskrider FASS rekommenderade maxdos för läkemedlet genom att granska behandlingsplanen innan du lämnar fliken "Behandlingsplan".

Varning! Säkerställ att behandlingsplanen lagts upp på rätt patient genom att granska namn och personnummer innan du lämnar fliken "Behandlingsplan"

Varning! Informera patienten att alltid söka kontakt med vården om hon/han upplever att AsthmaTuner rekommenderar en för liten eller för stor dos baserat på astmastatus.

OBS! Informera patienten att bekanta sig med användarmanualen för AsthmaTuner innan behandling påbörjas, samt att användning för barn och tonåringar under 18 år ska ske under vårdnadshavares tillsyn.

OBS! Informera även patienten om att maxdos och doseringsinformation för läkemedlet kommer att finnas angiven på förpackningen när läkemedlet hämtas ut på apoteket.

3.1.3 Trendgraf

Under fliken "Trendgraf" kan du följa hur patientens uppmätta lungfunktion, inrapporterade symptom och astmakontroll har sett ut över tid. Data samlas här när patienter använder verktyget för behandlingsrekommendationer i appen.

Data kan överblickas per vecka, månad och år. För att gå framåt eller bakåt i tiden klicka på pil vänster och pil höger som anger de tidsperioder som då kommer att överblickas istället. Genom att föra markören över de olika punkterna kan detaljerade data avläsas om lunkfunktionsvärde och antal symptom.

Astmakontrollen räknas ut genom följande algoritm:

Astmakontroll	Grön - Kontrollerad	Gul - Delvis kontrollerad	Röd - Okontrollerad
Antal Markörer	0 markörer	1-2 markörer*	3-5 markörer*

Lungfunktion < 20% av personligt bästa FEV1 räknas som en markör. Registrering av symptom på varje symptomfråga räknas som markör 0-4 st

3.1.4 Diagnosgraf

Diagnosgrafen är till för att utvärdera variation i lungfunktion över tid. Data samlas här om patienten har aktiverat "Utredningsverktyget" i AsthmaTuner appen.

Du kan välja om du vill se information för PEF eller FEV1 genom att använda drop-down menyn uppe i vänstra hörnet. Grafen visar faktiska värden i lungfunktion. Under grafen räknas dygnsvariabiliteten ut per dag, samt som genomsnitt över varje mätvecka.

Du kan välja att ladda ner alla mätvärden som en .csv fil genom att klicka på knappen "Ladda ner mätvärden"

3.2 Behandlingsmallar

För att underlätta arbetet med behandlingsplaner finns möjligheten att skapa standardiserade behandlingsplaner i AsthmaTuner ("Behandlingsmallar")

Här listas de aktuella förinstallerade behandlingsplanerna för vårdpersonalen. Dessa är uppdelade i två nivåer; *Klinik-specifika* behandlingsmallar som endast kan läggas upp och ändras av administratörer på kliniken, men som alla anställda på kliniken kommer åt. Under "*Mina behandlingsmallar*" kan du skapa personliga behandlingsmallar som bara du ser.

Stjärnan längst ut till höger på varje behandlingsmall är klickbar. Genom att klicka på stjärnan kan du tända eller släcka stjärnan; en tänd stjärna betyder att det är en favorit som du vill använda, den kommer då att finnas med i den drop-down lista när du skapar eller ändrar behandlingsplan för en specifik patient

3.3 Läkemedelssortiment

Under fliken "Läkemedel" finns en lista med samtliga tillgängliga läkemedel i AsthmaTuner Bilder av inhalatorer visas för lättare igenkänning.

OBS! Läkemedelslistan uppdateras regelbundet av utgivaren av AsthmaTuner, om du skulle upptäcka några felaktigheter i listan så maila info@asthmatuner.com

3.4 Vårdpersonal – endast admin

Under fliken vårdpersonal finns samtlig personal listad som tillgång till AsthmaTuners vårdgivargränssnitt på den aktuella kliniken. Genom att använda knapparna "Ta bort" och "Lägg till" kan du administrera vilka på kliniken som kan använda systemet.

3.5 Logg - endast admin

Under fliken logg finns det en lista med de aktiviteter som registrerats i vårdgivargränssnittet för den specifika kliniken.

Det går också att söka på en specifik patient med namn eller personnummer, eller en specifik vårdpersonal på kliniken.